

環境整備用ドライ不織布



Design Your Voice

Hakuzo

トイレに流せる

ハクゾウ フキトール

20枚入

薬液を注ぐだけでウェットタオルとして使用できます



製品
特長

- 薬液を注ぐだけで、環境整備用のウェットタオルとしてご使用いただけます。
(薬液量の目安は、約 200mL となります。)
- 使用後の基布をトイレに流して廃棄することが可能です。
※ 次亜塩素酸ナトリウムを注いで使用される場合は、薬剤の安定性やパルプの劣化の問題からお早めにご使用ください。
- 【調製者】・【薬剤名】・【注入日】・【使用期限】の記入欄を設けています。

【記入欄】

調製者	
薬剤名	
注入日	年 月 日
使用期限	年 月 日

(サイズ：20 cm×30 cm) 素材：パルプ

使用
方法

- ① 薬液を入れる場合は、シール口を剥がし薬液を注いでください。
- ② シール口を開けて、一枚ずつ取り出して使用してください。
- ③ ご使用後は、シール口を閉めてください。

使用上
の注意

- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 高温、湿度の高い場所及び直射日光を避け、清潔な場所に保管してください。
- トイレに流すときは、1回に2枚までとしてください。また、大の水量で流してください。大量の枚数を流すと詰まりの原因となります。

品 番	サイズ	包 装	1 梱入数	JAN コード
3394071	200mm×300mm	20 枚 / 袋	36 袋	 4 958286 601151

※詳細は各営業にお問い合わせください。



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号

TEL. 06-6942-0451 <http://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業部 ☎06-6809-4318 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118
東京支店 ☎03-3522-6720 阪神営業所 ☎078-262-1634
北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188
南大阪支店 ☎0721-20-2900 四国営業所 ☎0875-52-6900
神戸支店 ☎078-976-8901 北九州営業所 ☎093-617-3911
仙台営業所 ☎022-399-7091 福岡営業所 ☎092-481-5921
西東京営業所 ☎042-646-0451 熊本営業所 ☎096-345-2253
三河営業所 ☎0564-54-5447 沖縄駐在所 ☎098-941-5320
三重営業所 ☎059-350-3844 札幌駐在所 ☎011-788-8009
京都営業所 ☎075-603-4826