



Design Your Voice
Hakuzo

環境除菌用ウェットクロス

ハクゾウ環境クロス[®]Vプラス⁺ロック

第四級アンモニウム塩含浸の環境の洗浄・除菌用ウェットクロス

第四級アンモニウム塩
含浸



簡単!
ワンプッシュ
オープン

60枚入

洗浄
除菌

※水洗トイレに流さないでください。

サイズ	180mm×300mm
入数	60枚/個
基 材	レーヨン不織布
成 分	第四級アンモニウム塩、キレート剤、水

※キレート剤は、洗浄効果を下げる金属イオンの作用を防ぐための成分です。

製品特長

- 除菌・洗浄効果に優れた第四級アンモニウム塩を使用**
除菌・洗浄効果に優れた第四級アンモニウム塩を含ませた環境整備用ウェットクロスです。
- 材質への影響が少ない**
材質への影響が少なく、環境中の清掃に適しています。
また、揮発性が低く、1枚で広範囲に清掃できます。
- ワンプッシュ式のフタを採用!**
ワンプッシュ式のフタなので、簡単に開閉することができます。

使用
用途

- テーブル・ドアノブ・ベッドまわりなどの洗浄・除菌
- 汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌

使用上の注意

- 機器類に使用する際は機器付属の取扱説明書をご確認の上、ご使用ください。
- 合成皮革を含むすべての革製品には使用しないでください。
- 環境表面の材質により変質・変色などの影響を与えることがありますので、注意してご使用ください。
《特に注意が必要な箇所》
・プラスチック部分に対して負荷のかかる箇所、清拭後に液が溜まりやすい箇所(凹凸面、スイッチ、接合部など)は、亀裂を生じることがあります。
・コード類など可塑性等の添加剤を含む軟質プラスチックは、変質・変色することがあります。
・ニスなどで塗装されている木製品などは、変質によってべたつきが生じることがあります。
- 手荒れ防止のため、プラスチック手袋等を着用してからご使用ください。
- 人体の清拭には使用しないでください。
- 使用後はしっかりフタを閉めてください。
- 詰め替える際は容器内側とフタを拭き取り、乾燥させてご使用ください。
- 開封後に長期間使用しなかった場合、クロスが変色することがありますが、使用上問題ありません。
- 小児や認知症の方の手の届かないところに保管してください。
- 高温・多湿の場所及び直射日光を避け、清潔な場所に保管してください。

※詳細は各営業にお問い合わせください。

品 番	規 格	包 装	製品サイズ(mm)	1梱入数	ケースサイズ(mm)	JANコード
			製品重量(g)		ケース重量(kg)	
3395016	180mm×300mm	60枚/個	250×100×85	18個/ケース	350×305×255	4 958286 715322
			470		8.9	



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL. 06-6942-0451 <http://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 神戸営業所 ☎078-940-8975
東京支店 ☎03-3522-6720 広島営業所 ☎082-849-4188
北大阪支店 ☎072-653-4045 福岡営業所 ☎092-481-5921
南大阪支店 ☎0721-20-2900 熊本営業所 ☎096-345-2253
仙台営業所 ☎022-393-7434 札幌駐在所 ☎011-788-8009
関東営業所 ☎03-5809-4780 盛岡駐在所 ☎019-613-2176
西東京営業所 ☎042-646-0451 北陸駐在所 ☎076-225-8013
三河営業所 ☎0564-54-5447 松山駐在所 ☎089-994-8649
三重営業所 ☎059-350-3844 高松駐在所 ☎087-813-7416
京都営業所 ☎075-603-4826 山陰駐在所 ☎0859-30-2193
大阪中央営業所 ☎06-6943-6118 鹿児島駐在所 ☎099-296-1925
阪神営業所 ☎078-262-1634 沖縄駐在所 ☎098-941-5320