



外科製品

PPE

医療用マスク

プロフェッショナル マスクⅡ



ホワイト

ブルー

バリア性に優れた、肌ざわりの良い
サージカルマスクです。



外科製品

PPE

商品特長

1 優れたバリア性

- バリア性に優れたフィルタを使用しており、病棟や外来、検査室など、幅広く使用できます。

2 しっかりフィット

- ゴム紐がマスク外面から出ているため、頬に隙間ができていくなくなっています。
- フィット性の高いノーズフィッターを使用しているため、メガネやゴーグルが曇りにくくなっています。

3 やさしい肌ざわり

- 肌側に柔らかい不織布を使用しているため、ソフトな肌ざわりです。

4 耳が痛くなりにくい

- ゴム紐は、長時間の着用でも耳が痛くなりやすい平ゴムです。

商品情報

JIS T9001適合審査合格品

日本産業規格 JIS T 9001						
医療用マスククラスⅡ 規格適合番号 M22202005						
適合番号発行元: JHPIA						
試験項目	PFE	BFE	VFE	可燃性	血液バリア	安全衛生
規格値	≥98%	≥98%	≥98% (区分1)		16.0kPa	・通気性
適合判定	○	○	○	○	○	○

PFE: 微小粒子捕集効率

BFE: バクテリア飛まつ捕集効率

VFE: ウイルス飛まつ捕集効率

着脱方法

着け方



1 ノーズフィッターを上にして、ヒダが下向きになるように装着します。ゴム紐の付け位置は外面です(ブルーは、色面が外側になります)。



2 耳にゴム紐を掛け、ノーズフィッターを鼻の形に合わせます。

推奨使用シーン

使用部署	クラスⅠ	クラスⅡ	クラスⅢ
病棟	●	●※1	—
外来	●	●	—
検査室※2	●	●	●
救急科・ICU	—	●※3	●
手術室	—	—	●

※1: 口腔ケア・おむつ交換時など、飛散しやすい処置時

※2: MRI検査時を除く

※3: 小さな創傷、治りかけの創傷、極少量の血液飛散が想定される場合

外し方



3 ノーズフィッターを押さえたままプリーツを広げます。



マスク外面を触らないようにゴム紐をもって取り外します。

バリエーション

種類	カラー	サイズ
小さめ	ホワイト	9cm×14.5cm
フリー	ホワイト	9.5cm×17.5cm
	ブルー	

素材

本体・フィルタ: ポリプロピレン

ノーズフィッター: 鉄、ポリエチレン

耳紐: ポリエステル、ポリウレタン

※ラテックスフリー

(天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません)

⚠ MRI検査時は使用しないでください。ノーズフィッターが鉄素材のため、磁力でマスクが引き寄せられる恐れがあります。

商品規格

商品写真	品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	POSレジ登録用名称/JANコード	JANコード/ITFコード
	51424	プロフェッショナルマスクⅡ ゴム紐 フリー ホワイト 50枚入 9.5cm×17.5cm	販売単位 180 × 90 × 100	190.0g	40箱	プロ・ロマスクⅡ フリー W h	4971032514246
			外装 520 × 380 × 380	8.6kg			14971032514243
	51426	プロフェッショナルマスクⅡ ゴム紐 フリー ブルー 50枚入 9.5cm×17.5cm	販売単位 180 × 90 × 100	190.0g	40箱	プロ・ロマスクⅡ フリー B l	4971032514260
			外装 520 × 380 × 380	8.6kg			14971032514267
	51425	プロフェッショナルマスクⅡ ゴム紐 小さめ ホワイト 50枚入 9cm×14.5cm	販売単位 180 × 90 × 100	165.0g	40箱	プロ・ロマスクⅡ 小さい W h	4971032514253
			外装 520 × 380 × 380	7.6kg			14971032514250

◇ 商品はすべてオープン価格です。

Osaki
オオサキメディカル株式会社
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812
<https://www.osakimedical.co.jp/>



オオサキメディカル
オフィシャルサイト

取扱店

※規格には誤差が生じる場合があります。