

どこでも手すりについて

取付け穴の説明

- 付属部品 A4×30, 6×30ナイロンプラグ用取付け穴(φ5)

※取付けには下記の(一般的な壁に取付ける、浴室のタイル面に取付ける)を参照下さい。

- ユニットバス専用取付け穴(φ7)


※ユニットバスの取付けには ANC-900 メカバスナット(P66)をご参照下さい。

推奨取付け穴

※BR-270どこでもブラケットエンド、φ5取付け穴5箇所のうち2箇所は使用しません。下地により取付け穴位置をお選び下さい。

拡張加工必要取付け穴

※BR-271・BR-273・BR-274でメカバスナットをご使用の際はφ6.5～φ7.5の穴をあけて下さい。(BR-274は左右いずれか一方)

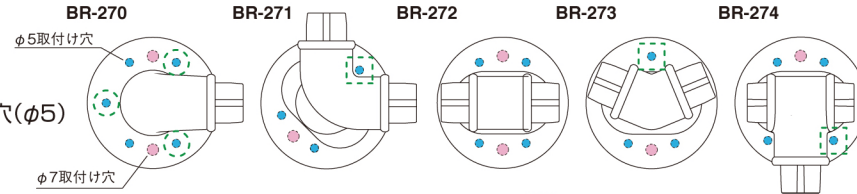


一般的な壁に取付ける

〔手すり取付けについて〕下記を参照下さい。


浴室のタイル面に取付ける

浴室のタイル面に取付けられる場合、堅固な下地を確認した上で、付属のビスとナイロンプラグとの併用をおすすめします。

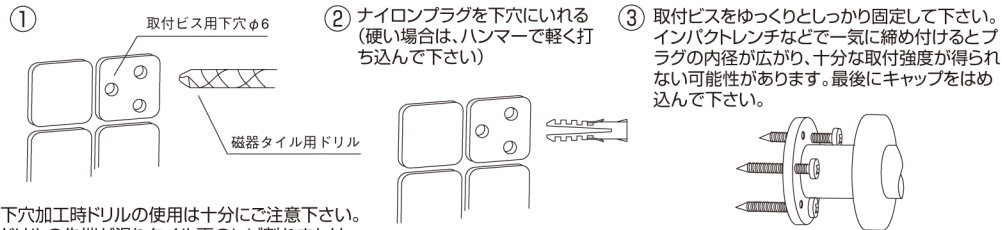

(参考)

全下穴とナイロンプラグのビス穴に水対応のため、注入する事をお奨めします。尚、注入後は硬化する前にすみやかに作業して下さい。

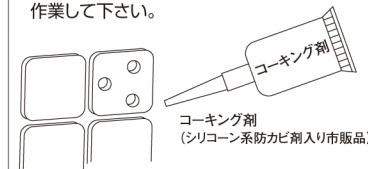


石こうボード壁

コンクリート壁

タイル+モルタル+木下地

石こうボード壁+後付け補強材

下地施工例

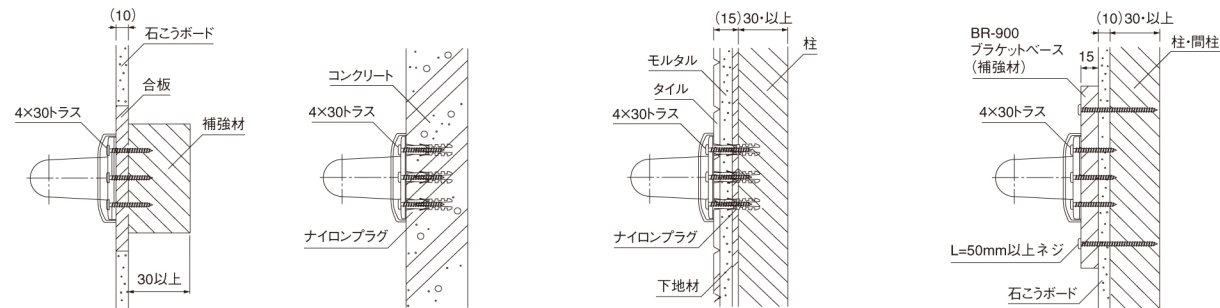

この方法はあくまで一般的な方法となります。取付面の材質や厚み建築構造により、付属ビスでは十分な強度を得る事ができない場合があります。その際は、販売店又は専門施工店にご相談下さい。ユニットバスへの後付けには、別途弊社に御相談下さい。