



# 室内用補助手すり どこでも手すりUタイプ

ユニバーサル

32φ BR-232, BR-233  
32φ BR-240, BR-241

## 施工説明

製品の機能が十分に発揮される様、この取扱説明書の内容にそって、正しく取付けてください。

### 安全上のご注意

取付の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく取付けてください。  
下記に示した **△注意** は、状況によって重大な結果(傷害・物損)に結びつく可能性があります。  
いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。  
取付完了後、異常がないことを確認するとともに、取扱説明書にそってお客様に使用方法・お手入れ方法を説明してください。

### △ 注意

- ① ブラケットの取り付け時、必ず30mm以上の厚みのある下地(柱・間柱・胴縁等)があることを確認した上で、キッチリと取り付けて下さい。  
下地には軽軟な木質のものは避けて、集成材等の重硬な物に取り付けてください。
- ② 壁面がタイル・コンクリートへの取付けの場合は付属のA4×30mmタッピンネジと6×30ナイロンプラグを併用して下さい。
- ③ 手すり以外の用途での使用はお避け下さい。  
(上に乗ったり、ぶら下がったりしないようにして下さい。)
- ④ 取付けが堅固な場合この製品の耐荷重は60Kg程度です。  
施工不良による事故の場合、弊社は責任を負いかねますのでご了承ください。

## 取扱説明

### お手入れ

手すりが常に美しさを保つよう、下記のお手入れを行ってください。

- ① 定期的に、やわらかな布でふいてください。
- ② 汚れがひどい場合は、中性洗剤をしみこませた布でふき、洗剤が残らぬよう後で水ぶきしてください。
- ③ シンナー等の溶剤やクレンザー等のみがき粉を含んだ洗剤、さらにはナイロンたわし等は使用しないでください。
- ④ 酸性やアルカリ性の洗剤は、変色・腐食・ツヤの消失が発生しますので、使用しないでください。

### 抗菌効果について

抗菌効果は、製品表面の細菌の増殖を抑制しますが、細菌が製品表面に直接接触しないと、効果が発揮されません。


また、これにより感染防止・防汚・防カビ・防臭・ぬめり防止等の副次的効果は発揮されません。

- ① 抗菌剤の種類 … 有機窒素硫黄系化合物
- ② 取扱注意事項 … 抗菌効果が発揮される様、製品表面にホコリや汚れが無いようにしてください。

## 完成図

BR-232, BR-240


※この製品は組立て済みです。

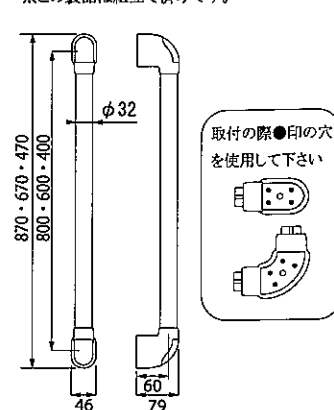

(付属品)  
A4×30 タッピンネジ 8本  
6×30 ナイロンプラグ 8本


BR-233, BR-241

※それぞれの手すり部分を  
コーナーエルボに差し込み、  
しっかりと取り付けてください。

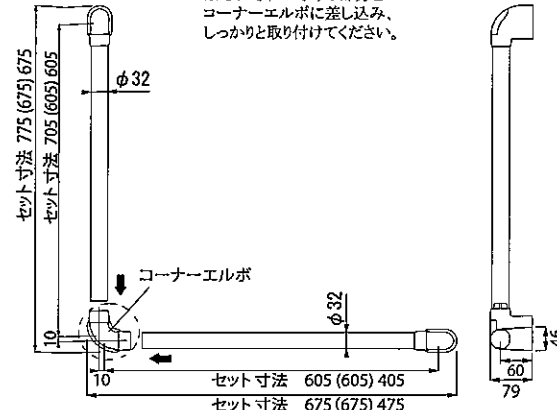

(付属品)  
A4×30 タッピンネジ 12本  
6×30 ナイロンプラグ 12本

## 施工例

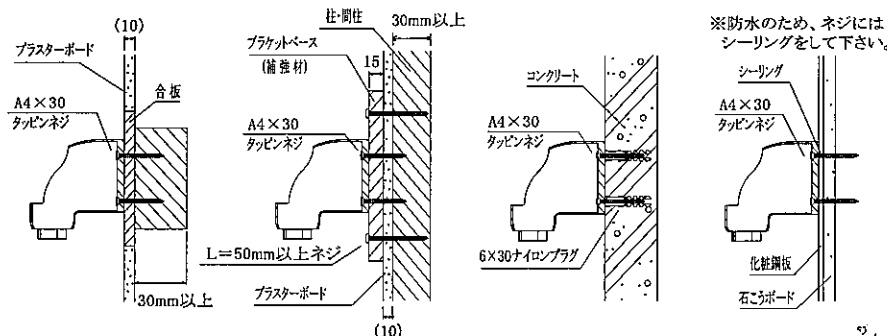

手すりの取付け位置に下地がない場合、上記のようにしっかりと補強材等の施工が必要です。  
また、壁に表付けで補強材を取付ける場合は、柱など下地のある所にしっかりと木ネジで取付けてください。

一般的に柱の間隔はP=910、間柱の間隔はP=450です。

製品改良のため、寸法・材質を予告無く変更することがあります。  
又、生産中止後の代替品の供給期間は、同一部品にて3年、代替部品として7年の計10年間となります。

株式会社 シロクマ

・建築金物・家具金物・住機部品・手すり関連・製造部

〒543-0023 大阪市天王寺区味原町3番7号 TEL 06-6768-3131(代) FAX 06-6768-3132(代)  
URL: http://www.shirokuma.co.jp/ E-mail: wb@shirokuma.co.jp

WB  
since 1947

## どこでも手すり保証書

|          |           |     |
|----------|-----------|-----|
| お客様      | おなまえ      | 様   |
|          | おところ 〒    |     |
| お取付店／販売店 | 〒         | (印) |
|          | TEL ( ) - |     |
| お取付日     | 年         | 月 日 |

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 品 番  | BR-232, BR-233<br>BR-240, BR-241 |
| 保証期間 | お取付日から5カ年                        |

左欄に記入の無い場合は無効となりますので、必ず記入の有無をご確認下さい。

本書は、本記載内容で無料修理を行なう事をお約束するものです。

表記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お取付店又は販売店に修理をご依頼下さい。

**株式会社 シロクマ**

・建築金物・家具金物・住機部品・手すり関連・製造卸

〒543-0023 大阪市天王寺区味原町3番7号 TEL 06-6768-3131(代) FAX 06-6768-3132(代)  
URL <http://www.shirokuma.co.jp/> E-mail [wb@shirokuma.co.jp](mailto:wb@shirokuma.co.jp)

**WB**  
since 1947

## BL保険制度

当社の定める施工要領を逸脱しない据付工事に瑕疵が生じ、施工業者が無償修理や損害賠償を行った場合、BLマークの証紙の貼付けがされている部品については、財団法人ベターリビングのBL保険制度により保険金が支給されます。

万一、弊社又は施工業者が倒産等している場合、弊社等による瑕疵保証責任等に代わる処置が同財団から受けられます。

BL保険制度や当住宅部品の施工要領の詳細については、財団法人ベターリビングのホームページ(<http://www.blhp.org/>)や当社のホームページ(<http://www.shirokuma.co.jp>)をご覧ください。

## 無料修理規定

1. 施工説明書に従い、取扱説明書に沿った正常な使用状態で故障した場合には、表記の期間、無償修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無償修理を受ける場合は、お取扱店又は販売店にご依頼の上、出張修理に際して、本書をご提示下さい。
3. ご転居の場合は事前に、お取付店又は販売店にご相談下さい。
4. 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
  - ① 使用上の誤り及び不当な修理や改造による不具合。
  - ② 施工上の不注意・過失による不具合。
  - ③ お取付後の移設等に起因する不具合。
  - ④ 根太の変形や歪みなど手すり本体以外の不具合に起因する不具合。
  - ⑤ 経年変化により生ずる外観上の現象。
  - ⑥ 手すり以外での用途に使用された場合の不具合。
  - ⑦ 砂やゴミ等異物がかむ事による不具合。
  - ⑧ 汚れや磨耗・キズ等、通常の手入れ不足による不具合。
  - ⑨ 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性に空気環境に起因する不具合。
  - ⑩ 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、戦争・暴動等破壊行為による不具合。
  - ⑪ 本書のご提示の無い場合。
  - ⑫ 本書にお客様名、お取付店又は販売店名、お取付日の記入の無い場合。
5. 本書は日本国内においてのみ、有効です。
6. 本書は再発行されませんので、紛失しないように大切に保管して下さい。

※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。  
従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。  
保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、(株)シロクマにお問い合わせ下さい。