


ポータブルコーナートイレ

組立て方法

- ① 図のように組立ててください。

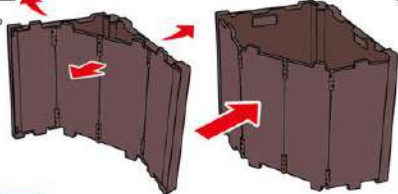

ご使用方法

- ② 底板は矢印の方から先に差し込んでください。




- ③ 付属品一式を中に入れ、便座とフタをセットしてください。




トイレとして使用される場合

- ① フタと便座を外して、本体に汚物袋をかぶせてください。

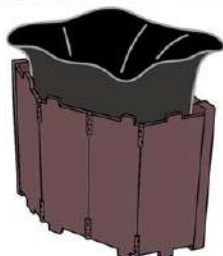

- ② 袋の上から便座をのせてしっかり固定してください。

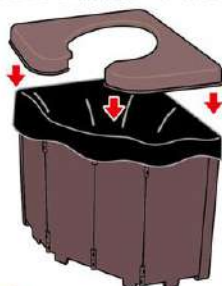

- ③ 使用後は、汚物の上にまんべんなく凝固剤をふりかけてください。(1回に凝固剤1個を目安に使用してください。)




- ④ 汚物袋を取り出し、袋の口をしっかりと結んで廃棄してください。結ぶことで、イヤな臭いが、もれにくくなります。



特長

- 本体を開いて、底板で固定し、便座とフタをのせることで簡単に組立てできます。
- 折りたたみ式ですので持ち運びに便利です。(外装箱を収納箱として使用できます。)
- コーナーに置けるので場所をとりません。
- 約120kgの体重まで支えることができます。
- 室内でポータブルトイレとしても使用できます。
- 汚れた場合は、水洗いできます。(底板は洗えません)

商品サイズ

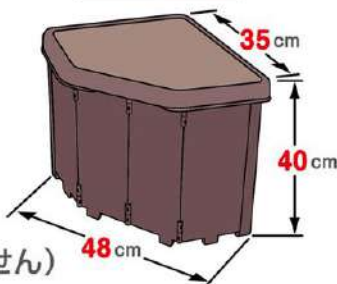

セット内容



△ 注意 ご使用になる前に必ずお読みください。

- 大便・小便にも使用できますが凝固剤は水分を固めるものであり、大便を固めることはできません。尿の量によっては固まりにくい場合があります。その際には凝固剤を追加してご使用ください。
- お薬を服用されている方は、薬の影響で尿が凝固しない場合があります。
- 凝固剤は開封しない限り使用可能です。
- 廃棄はお住まいの地域の処理方法に従ってください。
- 汚物袋は毎回取り替えてください。
- 汚物袋は幼児や子供にとって窒息などの危険性が伴いますので、手の届かない所に保管してください。
- 本来の用途以外には使用しないでください。

クッションシート

- 寒くなりますと(5度以下)吸着力が弱くなる場合があります。
- ご使用状況にもよりますが、洗濯約30回位で吸着力が弱まってきます。交換時期ですので、買い換えていただくことをお勧めいたします。

※商品の品質には万全を期していますが、万一不備な点がありましたら、消費者サービス課までご連絡ください。

クッションシートのお洗濯方法



乾燥機
使用できません。

ドラム式洗濯機
やわらかモード(手洗いモード)で
使用してください。

洗濯について



○通しています
△特によくすすいでください
×使用できません

補充される場合は、

別売の R-40 トイレ非常用袋 10回分
を、お買い求めください。

商品に対するお問い合わせは
消費者サービス課

0120-87-1149

電話受付時間 月～金曜(土日除く)
AM9:00～12:00 PM1:00～5:00

品質表示

【トイレ本体】
本体・便座: ポリプロピレン
フタ: ABS樹脂
底板: 木
クッションシート:
表面: ポリエステル 100%
裏面: アクリル樹脂(カデキン入り)
【凝固剤】
高分子ポリマー
【汚物袋】
ポリエチレン

発売元 **株式会社サンコー**

〒642-0022 和歌山県海南市大野中715

ホームページアドレス <http://www.sanko-gp.co.jp>

メールアドレス liv@sanko-gp.co.jp

MADE IN JAPAN

R-46 ブラウン



4 973381 585584

ダンボール

