


ほこりに、花粉に、細菌に、ウイルスに、ハウスダストに

3層構造

最内層に抗菌防臭効果のある
カテキン加工ナイロン不織布を採用

ウイルス飛沫 99%カット (ネルソン研究所)
バクテリア飛沫 99%カット (ネルソン研究所)
花粉 99%カット (カケンテストセンター)

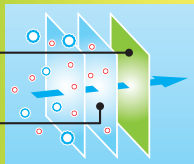

特長

- 最内層に抗菌防臭効果のあるナイロン不織布を使用したマスクです。
- 株式会社伊藤園の「ティーライフ®」技術を用いてカテキン加工したナイロン不織布を使用しています。
- 呼気の上昇によるメガネの曇りを抑制する「アンチフォグフィルム」を付加しています。

※カテキン不織布は自然な色合いがありますが、天然のカテキン成分によるものですのでご心配ありません。また、保管状況や時間経過によっては変色及び、香りが減少する可能性があります。香りの感じ方は個人差があります。

マスクの使用方法

- ①ノーズフィッターのある方を上にし、マスクが立体になるようにブリーツを上下に広げます。
(ゴム紐の接合面がある方を口側にして顔にあててください)
- ②ゴムひもを無理なく引っ掛けて耳にかけてください。
- ③ノーズフィッターを鼻の両側で押さえて鼻の形にフィットさせてください。
- ④鼻からあごまでを覆うようにし、顔とマスクの間にすきまが出来ないようにマスクの形を整えてください。

ご使用上の注意

- 本品は使いきりマスクです。洗濯による再使用はできません。
- マスクの内側に粉塵、ほこり、ゴミ等で汚れた場合は、新しいマスクと交換してください。また、マスクが変形した場合や、ゴムバンドが破損したり緩んだ場合も新しいマスクと交換してください。マスクと顔の間にすきまができると、マスクの効果がなくなります。
- マスク上部に樹脂製のノーズフィッターがついていますので、取り扱いにはご注意ください。
- 個人差によって眼鏡がくもることがありますので、十分にご注意ください。
- 本品は有害な粉塵やガス等が発生する場所やそれを防ぐ目的でのご使用はできません。
- 万一、かゆみ、かぶれ、発疹等が生じた場合はただちにご使用を中止してください。
- 万一、においにより気分が悪くなった場合はただちにご使用を中止してください。
- 乳幼児の手の届かない所に保管してください。
- 湿気のない清潔な場所に保管してください。
- 火気のそばでのご使用はおやめください。

品 名	緑茶カテキンマスク
対 象	かぜ、花粉、ほこり等
素 材	●表カバー: ポリアプロピレン ●フィルター: ポリアプロピレン ●口元カバー: ナイロン(カテキン不織布) ●アンチフォグフィルム: ポリアプロピレン、ポリエチレン ●耳掛けゴム: ポリウレタン、ポリエステル ●ノーズフィッター: ポリエチレン
抗菌剤	カテキン
枚 数	50枚
商品サイズ	90×175 mm

MADE IN JAPAN

総発売元 **トラスコ中山株式会社** お客様相談室 ☎ 0120-509-849
〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: techno.center@trusco.co.jp

<http://www.orange-book.com/>

発注コード 421-7390

品番 TRCM-L